


24時間ホルター心電図検査を受けられる方へ

■ホルター心電図検査とは

ホルター心電図検査は、日常生活の心電図を記録するために、丸1日(24時間)をかけて実施します。

検査の目的は、動機、息切れ、胸の痛みなどの症状があるときの心電図の状態を確認したり、不整脈や狭心症を確認することです。

■検査の流れ

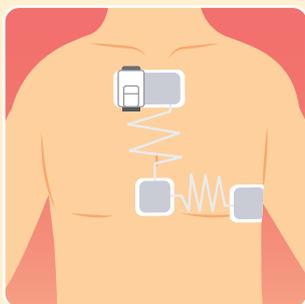

- 1 心電図を記録するために電極と記録器を取り付けます。


取り付け日： 月 日 時 分頃

※服装について…襟元が広く開いた服装の場合、電極が見えることがあります。



- 2 記録器を取り付けたまま、いつもと同じ生活を送ってください。(24時間)

入浴可 ・ 入浴不可

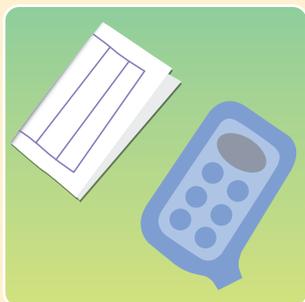

- 3 丸1日経ちましたら、来院いただき、電極と記録器を取り外します。

行動記録メモ ・ Cardy memo を持ってきてください。

取り外し日： 月 日 時 分頃



- 4 後日、診断結果をご説明いたします。

24時間ホルター心電図検査の注意事項



■普段通りの生活で


- ホルター心電図とはあなたの1日の心電図を記録する検査です。検査中はいつもと同じ生活をするよう心がけてください。



入浴・シャワー不可

■行動記録メモ

- 行動記録はあなたの心電図情報を診断する上で重要な情報です。検査中に自覚症状があったときは、該当する症状や行動のボタンまたは、**EVENT** ボタンを押してください。
- Cardy memo を浴室に持ち込んだり、洗濯機に入れるなど水につかないようにしてください。

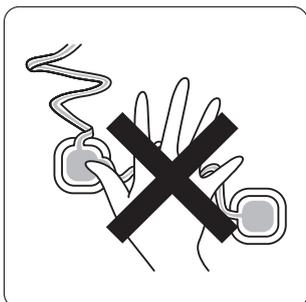

■記録器等の取扱い

- 記録器、電極、コードには検査中触れないでください。
- 低周波治療器は使用しないでください。
- ネックレス等のアクセサリーは外してください。



■入浴について

- 医師や検査技師の指示に従ってください。
- 体を洗う際には、電極やコードをさけてください。
- お風呂あがりには、タオルで電極をやさしくおさえ、水気をとってください。
- プール、サウナ、ジャグジーバスや温泉等での使用、入浴剤、石鹸やシャンプーの使用はしないでください。
- 電極部を手やタオルでこすったりしないでください。



■寝るとき

- 記録器を衣類内に装着したまま寝てください。
- 電気毛布は使用しないでください。

お問い合わせ先

TEL