

「ライフコーダ EX4 秒版通信ソフト」ユーザー様へ 「ライフコーダ 4 秒版通信ソフト」へのバージョンアップのお願い

「ライフコーダ EX4 秒版」の販売中止に伴い、後継機種となる「ライフコーダ GS4 秒版」を発売しました。これにより、「ライフコーダ EX4 秒版通信ソフト」も「ライフコーダ 4 秒版通信ソフト」へ変更となりました。

「ライフコーダ EX4 秒版通信ソフト」を既にご購入されているお客様には、「ライフコーダ 4 秒版通信ソフト」への無償バージョンアップをお願いします。

「ライフコーダ 4 秒版通信ソフト」は、「ライフコーダ EX4 秒版」と「ライフコーダ GS4 秒版」の両機種のデータ抽出ができます。また、「1 分毎平均 METS 出力」や「1 分だけでなく 2,3,4,5,10,15 分毎の活動データ出力」機能が追加されています。



ライフコーダ GS4 秒版をご使用される方は必ず無償バージョンアップを行ってください。

1. バージョンアップを行う前のご準備

バージョンアップを行う前に、ご購入いただいています「ライフコーダ EX4 秒版通信ソフト」の操作マニュアルをご用意ください。

ソフトウェアのインストールには、操作マニュアル表紙に記載されている PRODUCT KEY(赤線枠内の英数字コード)が必要となります。

このコードはご購入いただいた製品にのみ記載されています。バージョンアップ版等には記載されていません。

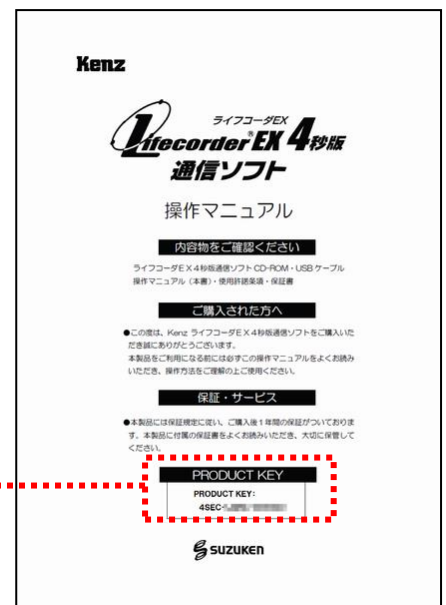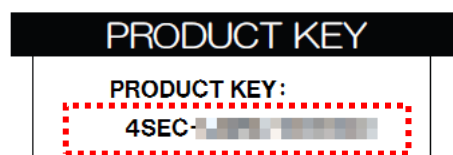

赤線枠内がインストール時に必要となります。

この PRODUCT KEY は、今後のバージョンアップ時にも必要となりますので大切に保管してください。

2. バージョンアップ版のダウンロードとインストール

下記のサイトよりバージョンアップ版のダウンロードをお願いします。

<http://www.suzuken.co.jp/product/healthcare/support.html>

このサイトより次の 2 つのダウンロードを実施してください。

① 「ソフトウェアダウンロード」項の「ライフコーダ (EX)4 秒版通信ソフト」をクリックするとソフ

トウェアのダウンロードページとなりますので、このページの内容をご確認の上ダウンロードを実施してください。

- ② 同じページ内に「ライフコーダ (EX) 4 秒版通信ソフトの取扱説明書はこちら」のリンクがありますので取扱説明書も保存してください。

バージョンアップダウンロードに添付されているPDFファイルと取扱説明書のインストール項目をご確認いただき、インストールを実施してください。

インストールが終了しますと「ライフコーダ4秒版通信ソフト」のアイコンがデスクトップに作成されますので、今後はこちらのソフトウェアをご使用ください。

このソフトウェアをインストールしても「ライフコーダ EX4 秒版通信ソフト」はアンインストールされませんのでご注意ください。

3. ライフライザー05 コーチのバージョンアップ

ライフライザー05 コーチ ver2.10 より以前のバージョンをご使用の場合は、お手数ですがライフコーダ 05 コーチもバージョンアップもお願いします。

このライフライザー05 コーチのバージョンアップにより、ライフコーダ GS4 秒版の CSV ファイルを読み込んだ場合の不具合が修正されます。

こちら、下記のサイトよりバージョンアップ版のダウンロードをお願いします。

<http://www.suzuken.co.jp/product/healthcare/support.html>

「ソフトウェアダウンロード」項の「ライフライザー05 コーチ」をクリックするとソフトウェアのダウンロードページとなりますので、このページの内容をご確認の上ダウンロードを実施し、インストールを実施してください。

注意:

インストール時には、ダウンロード内容に添付されています「ライフライザー05 コーチのご使用にあたって.pdf」の確認を必ずお願いします。

4. ダウンロードページへの入り方



The screenshot shows the Suzuken website interface. A red dashed box highlights the '製品紹介' (Product Introduction) menu item in the top navigation bar. A blue arrow points from this menu item to a '製品紹介' page. On this page, another red dashed box highlights the 'ヘルスクア関連製品' (Health Care Related Products) section. A blue arrow points from this section to a 'サポート' (Support) page. A text box at the bottom of the screenshot contains the following text:

スズケンホームページの「製品紹介」→「サポート情報はこちら」からライフコーダサポートサイトに入ることができます。