

CSV データエクスポート 簡易マニュアル

本資料は、ライフライザー05 コーチより数値データ(CSV データ)を取出す方法を記載します。

(ア) ライフライザー05 コーチの起動

- A) デSKTOP上の「Lifelyzer05 Coach」アイコンをダブルクリック、または、スタートメニューの「プログラム(P)」もしくは「すべてのプログラム(P)」から「Suzuken」→「Lifelyzer05 Coach」→「Lifelyzer05 Coach」をクリックしてください。



(イ) ライフコーダデータの取だし [CSV エクスポート]


- A) 「ログイン」ボタンを押してください。
すると、ログインの入力ボックスが表示されますので、ログイン ID に kenz と入力して、「ログイン」ボタンを押してください。




- B) 「利用者一覧」ボタンを押してください。



- C) データを取出したい「ライフコーダ装着者のアイコン」を押してください。

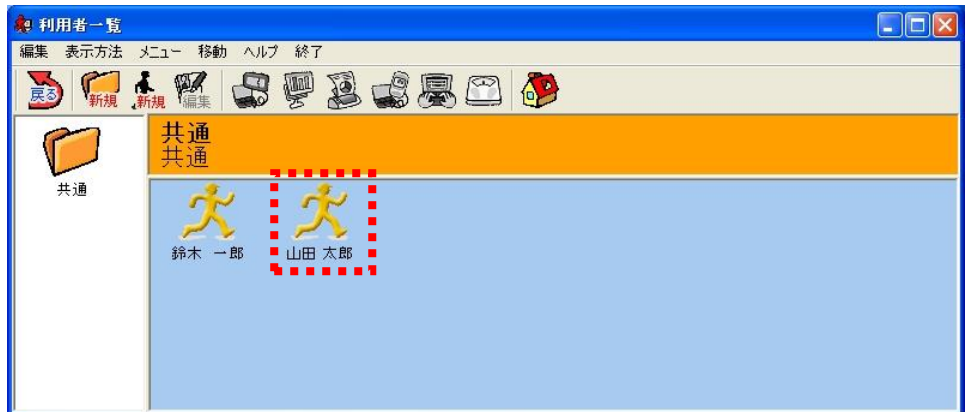


- D) 「CSV エクスポート」機能を選択します。
メニューバーの「メニュー」を選択し、プルダウンメニューの「CSV エクスポート」を選択します。

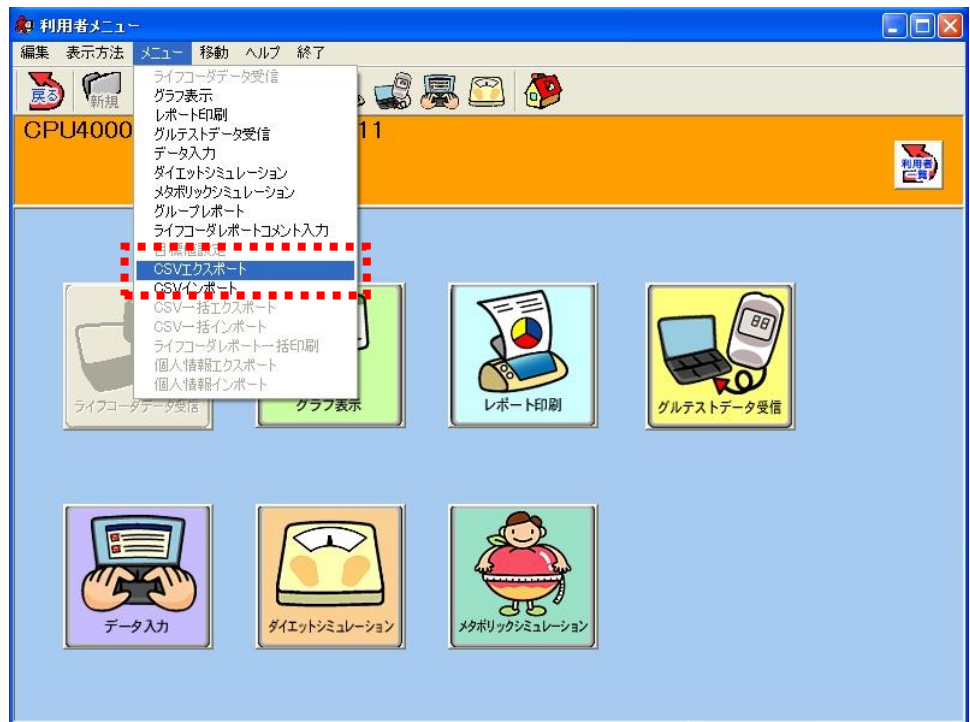

E) データの出力

取出したい日付の期間を設定して、「OK」ボタンを押してください。

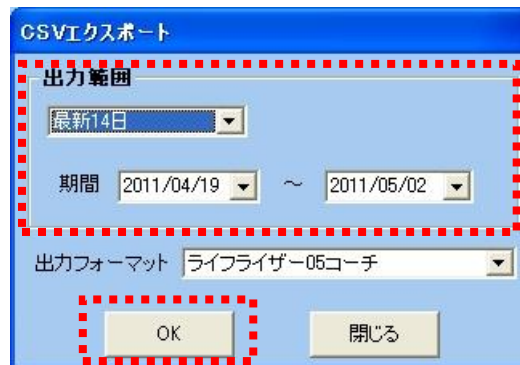

ファイル保存のダイアログが表示されますので、ライフコーダデータのファイル名と保存場所を指定してください。

デフォルトでは、マイドキュメント下の「¥ライフライザー05 コーチ¥CSV エクスポート」フォルダの下に保存されます。

出力フォーマットについて:

出力フォーマットは 3 種類あります。

- ライフライザー05 コーチ
- ライフライザー03 コーチ
- ライフライザー02 プロ・ベーシック

これは、ライフライザー05 コーチより以前のライフライザーをご使用されている場合に、旧バージョンと同じデータフォーマット出力するための選択機能です。

弊社ソフトウェアをライフライザー05 よりご使用になられた方は、デフォルトの「ライフライザー05 コーチ」形式を選択してください。