

## CSV データインポート 簡易マニュアル

本資料は、ライフライザー05 コーチへ「別のライフライザーのデータ」または「ライフコーダ 4 秒版またはライフコーダ GS4 秒版のデータ」である CSV データを取り込む方法を記載します。

### (ア) ライフライザー05 コーチの起動

- A) デスクトップ上の「Lifelyzer05 Coach」アイコンをダブルクリック、または、  
スタートメニューの「プログラム(P)」もしくは「すべてのプログラム(P)」から「Suzuken」→「Lifelyzer05 Coach」→「Lifelyzer05 Coach」をクリックしてください。



### (イ) ライフコーダデータの取込み [ CSV インポート ]


- A) 「ログイン」ボタンを押してください。  
すると、ログインの入力ボックスが表示されますので、ログイン ID に kenz と入力して、「ログイン」ボタンを押してください。




- B) 「利用者一覧」ボタンを押してください。



- C) データを取込みたい「ライフコーダ装着者のアイコン」を押してください。  
ユーザーが登録されていない場合は、ユーザーを登録してください。

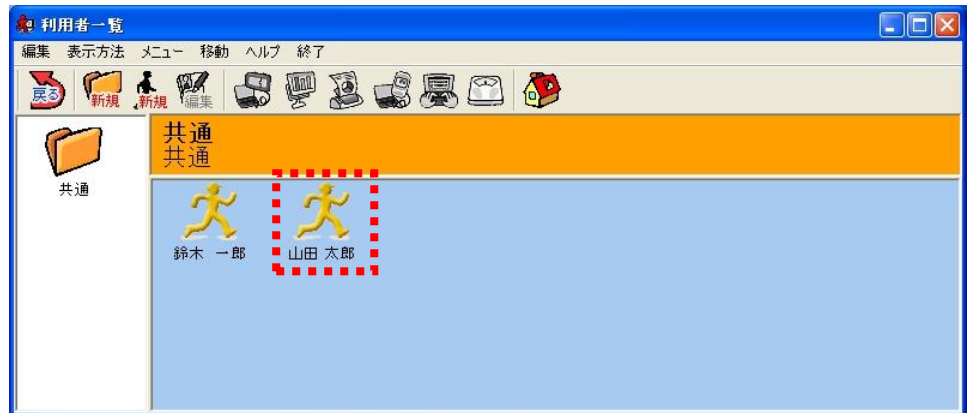

- D) 「CSV インポート」機能を選択してください。  
メニューバーの「メニュー」を選択し、プルダウンメニューの「CSV インポート」を選択してください。

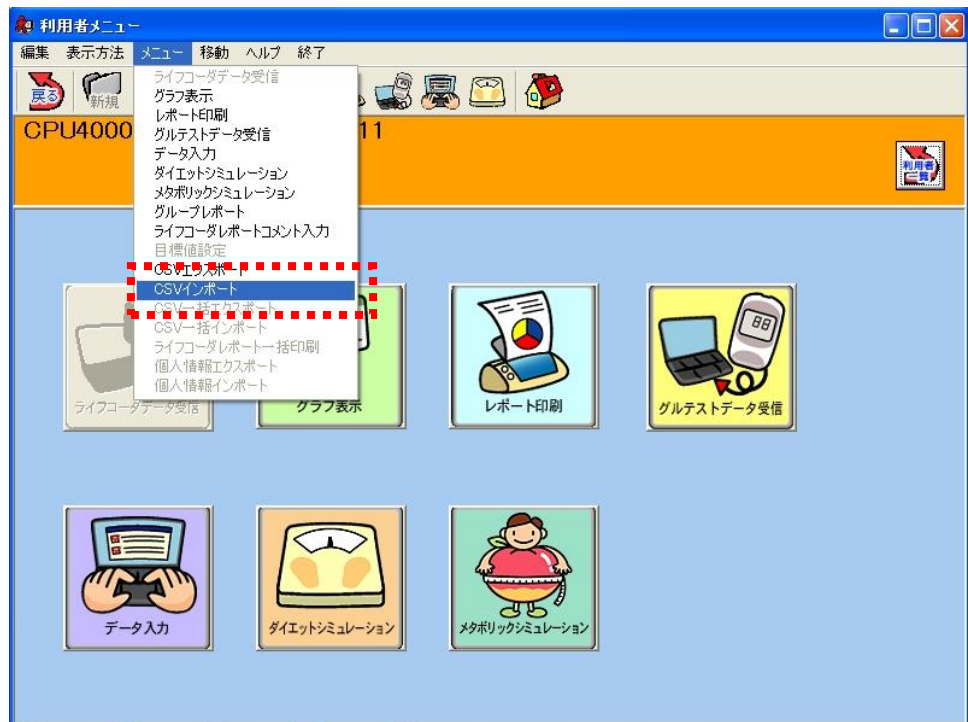

- E) CSV データの選択  
ファイル読込のダイアログが表示されますので、インポートしたいライフコーダデータの  
ファイルを指定してください。

ライフコーダ GS4 秒版またはライフコーダ EX4 秒版での取込めるデータ種類:

◆ ライフコーダ 4 秒版通信ソフトで通信した場合:

デフォルト設定では、Windows のマイドキュメントの下にある、次のどちらかのファ

イルを選択してください。

¥Lifecorder4S¥LL05¥フォルダにある”xxx\_LL05\_yyyymmdd.csv” (こちらを推奨)

¥Lifecorder4S¥フォルダにある”xxx\_2min\_yyyymmdd.csv”

◆ ライフコーダ EX4 秒版で通信した場合:

デフォルト設定では、Windows のマイ ドキュメントの下にある次のファイルを選択してください。

¥LifecorderEX¥フォルダにある”xxx\_2min\_yyyymmdd.csv”