



生活習慣記録機
ライフコーダEX 4秒版



生活習慣記録機

Lifecorder[®] EX 4秒版

4秒ごとの動きの強さをとらえ
研究などのデータ処理に役立ちます

通信ソフトを使い体の動きをより細かく分析します

4秒ごとの運動強度

(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)
00:00	0	0	0	0	0	0
00:04	0	0	0	0	0	0
00:08	0	0	0	0	0	0
00:12	0	0	0	0	0	0
10:10:56	3	4	7	6	1	6
10:11:00	5	4	7	5	0.5	5
10:11:04	6	4	8	6	0.5	6
10:11:08	6	5	6	5	3	5
10:11:12	5	5	6	5	3	4
10:11:16	5	6	4	5	4	4
10:11:20	6	5	4	7	4	5
10:11:24	6	7	4	4	3	6
10:11:28	5	3	5	5	1	5
10:11:32	4	4	5	5	1	5
10:11:36	6	4	7	6	2	6
10:11:40	5	5	8	5	2	5
10:11:44	4	6	7	3	2	4
10:11:48	4	6	6	4	6	4
10:11:52	5	5	6	4	4	6
10:11:56	5	0.5	5	3	0.5	5
10:12:00	6	2	3	5	4	5
10:12:04	6	2	4	5	4	6

1分ごとの歩数

受信日	2005/5/16	2005/5/17	2005/5/18	2005/5/19	2005/5/20	2005/5/21	2005/5/22
(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(日)
00:00	0	0	0	0	0	0	0
00:01	0	0	0	0	0	0	0
00:02	0	0	0	0	0	0	0
00:03	0	0	0	0	0	0	0
00:04	0	0	0	0	0	0	0
10:10	119	2	89	129	2	128	21
10:11	117	69	125	125	45	121	32
10:12	118	15	126	127	64	119	101
10:13	124	37	123	126	56	123	25
10:14	125	42	124	124	65	124	6
10:15	117	22	109	126	50	124	124
10:16	89	55	114	128	55	128	126
10:17	95	56	128	109	60	127	123
10:18	129	54	129	60	30	129	123
10:19	124	30	109	30	12	124	123
10:20	118	35	112	25	10	129	109
10:21	121	25	127	88	8	125	124
10:22	114	18	124	108	12	114	126
10:23	115	11	126	116	21	115	123
10:24	89	27	125	121	8	121	36

**身体活動の強度と生活習慣病の
新しい治療指針づくりに活用できます!**

ライフコーダシリーズに“4秒版”をラインナップ! あわせて通信ソフトもご用意しました。

生活習慣記録機 ライフコーダEX 4秒版


- 1日の総消費量・運動量・歩数を計測、表示
加速度センサで4秒ごとの動きの強さをキャッチ、個人ごとの消費カロリーを計測します。
- 35日メモリ
4秒ごとの運動強度・1分ごとの歩数を35日分記録します。
- パソコンとUSBで通信可能

ライフコーダEX 4秒版通信ソフト

- USBでパソコンと簡単に接続可能
4秒ごとの運動強度・2分ごとの運動強度・1分ごとの歩数を簡単に通信できCSV形式でファイルを保存します。

ご利用イメージ

- ① ライフコーダEX 4秒版を装着して生活習慣を記録
- ② 通信ソフトでパソコンにデータ通信
- ③ 2分ごとの運動強度ファイルをライフライザー02 ベーシック/プロ(別売)でグラフ表示・印刷
※事前にライフライザー02 ベーシック/プロのインストールが必要
CSVデータを利用し市販表計算ソフト等でデータ処理

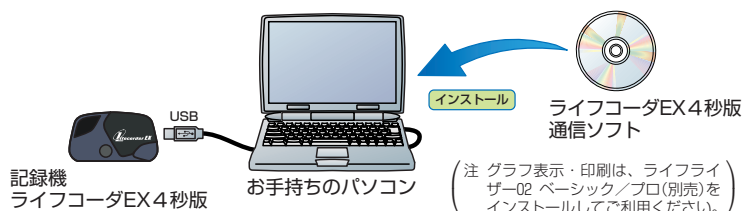

生活習慣記録機 **ライフコーダEX 4秒版** (商品コード：382-160422)

メーカー希望小売価格 37,000円
(税込 38,850円)

製品構成

ライフコーダEX 4秒版本体(1台)、取扱説明書(1部)、落下防止ストラップ(1本)、装着用ベルト(1本)、モニター用電池(5個)、USBキャップ予備(1個)、記録シール(10枚)、注意事項記載カード(10枚)、保証書(1部)、動産保険のご案内



※落下防止ストラップ付き

仕様

検出方式	加速度センサ	通信方式	USB Revision1.1
表示	総消費量(0~99,999kcal) 運動量(0~99,999kcal) 歩数(0~99,999歩) 時刻(0:00~23:59)	電源	DC3V(ボタン型リチウム電池 CR2032×1個)
メモリ	35日	電池寿命	約3.5ヶ月
		外形寸法	幅72.5mm×高さ41.5mm×厚さ27.5mm(フック部を含む)
		重量	60g(電池を含む)
		使用温度範囲	+5℃~+40℃(結露なきこと)

従来のライフコーダEXとの違い

	運動強度データ サンプリング単位		歩数データ		メモリ 期間	メモリ 方式	通信 方式	電池寿命	途中電 池交換	パソコン からの設定	運動強度 判定表示	その他
	4秒	2分	積算値	1分ごと								
ライフコーダEX 4秒版	○	○	○	○	35日	巡回	USB	約3.5ヶ月	可能	不可能	なし	
ライフコーダEX	×	○	○	×	200日	巡回 固定 ¹⁾ 3)	USB	約7ヶ月	可能 ²⁾	可能 ³⁾	あり	キーロック ³⁾ 判定待機モード ³⁾

1) 工場出荷時メモリ方式は巡回(ループ)で設定されています。最新200日分のデータを常に保持します。

2) 電池交換してもメモリ内容、個人データの設定値は消えません。ただしメモリ方式を固定(ロック)で使用された場合は特別な操作が必要です。

3) ライフライザー02 プロ(別売)が必要です。

ライフコーダEX 4秒版通信ソフト (商品コード：382-160521)

メーカー希望小売価格 43,100円
(税込 45,255円)

製品構成

CD-ROM(プログラム)、通信ソフト取扱説明書、製品使用許諾条項、保証書、USBケーブル

仕様

通信データ：4秒ごとの運動強度・2分ごとの運動強度・1分ごとの歩数を通信できCSV形式でのファイル保存

リンク：ライフライザー02 ベーシック/プロ(別売)がインストールされているときは、リンク起動可

解析：2分ごとの運動強度のファイルは、ライフライザー02 ベーシック/プロ(別売)で解析し、グラフ表示・印刷可

環境

対応OS：Microsoft Windows® 98SE、Me、2000、XP 日本語版(Server製品は除く)

Microsoft Windows® XPは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

ハードディスク空き容量：インストールするには、約20MBのディスク容量が必要です。

データをCSV形式で保存する場合、1人あたり最大約2MBのディスク容量が必要です。

表示解像度：800×600ドット以上256色以上

通信方式：USB Revision1.1以上、CD-ROMドライブ



お問い合わせは ☎ 0120-988-468 受付時間/平日 月~金 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)
※携帯電話からはつながりません。

けんこう生活支援情報サイト

ライフスタイルクリニック「歩きの科学」で、歩くことに関する情報をわかりやすくお届けします。

<http://kenkou.suzuken.co.jp/>

製造発売元

株式会社 **スズケン**

ケンツ事業部

名古屋市中区東片端町8番地 〒461-8701
TEL(052)950-6325 FAX(052)962-7440
ホームページ <http://www.suzuken.co.jp>
E-mail: kenz@suzuken.co.jp