

ライフライザー02 プロをご使用の先生方へ

CSV データエクスポート 簡易マニュアル

本資料は、ライフライザー02 プロより数値データ(CSV データ)を取出す方法について記載します。

(ア) ライフライザー02 プロの起動

- A) デスクトップ上の「ライフライザー02 プロ」アイコンをダブルクリック、または、スタートメニューの「プログラム(P)」もしくは「すべてのプログラム(P)」から「Suzuken」→「Lifelyzer02」→「ライフライザー02 プロ」をクリックしてください。




(イ) ライフコーダデータの取だし [CSV エクスポート]


- A) メニュー画面が表示されますので、「データ編集」ボタンを押してください。



- B) 取り込まれているデータのリストが表示されます。エクスポートしたいデータの□をクリックして、選択状態にしてください。

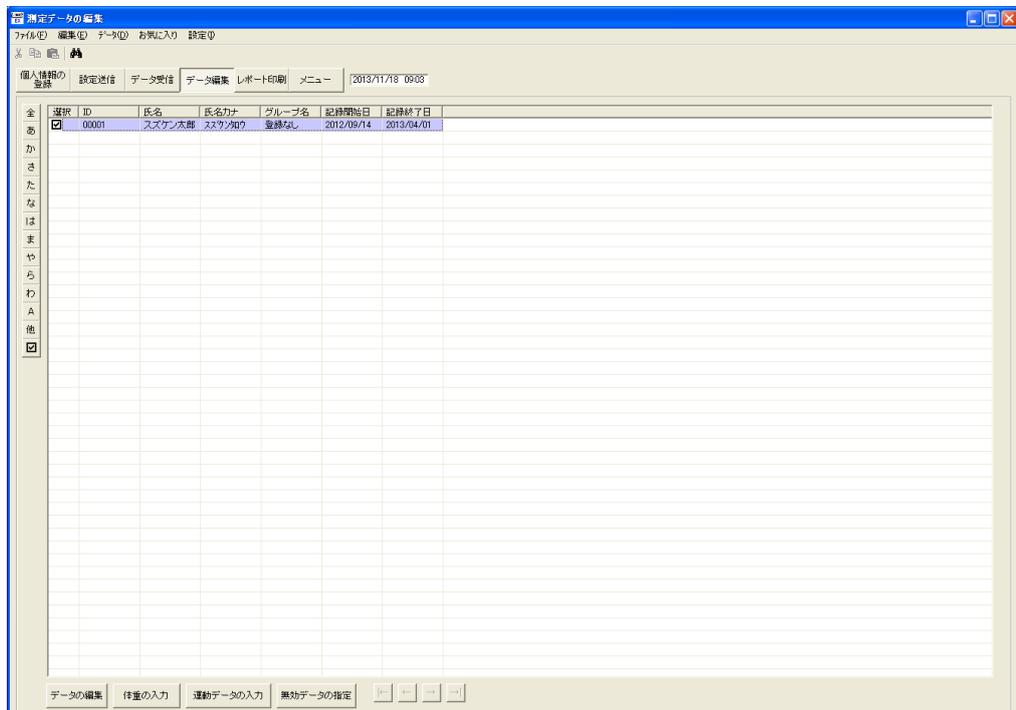


- C) 「CSV エクスポート」機能を選択します。
メニューバーの「データ」をクリックし、プルダウンメニューの「エクスポート」を選択して表示されるメニューの「測定データ」を選択します。

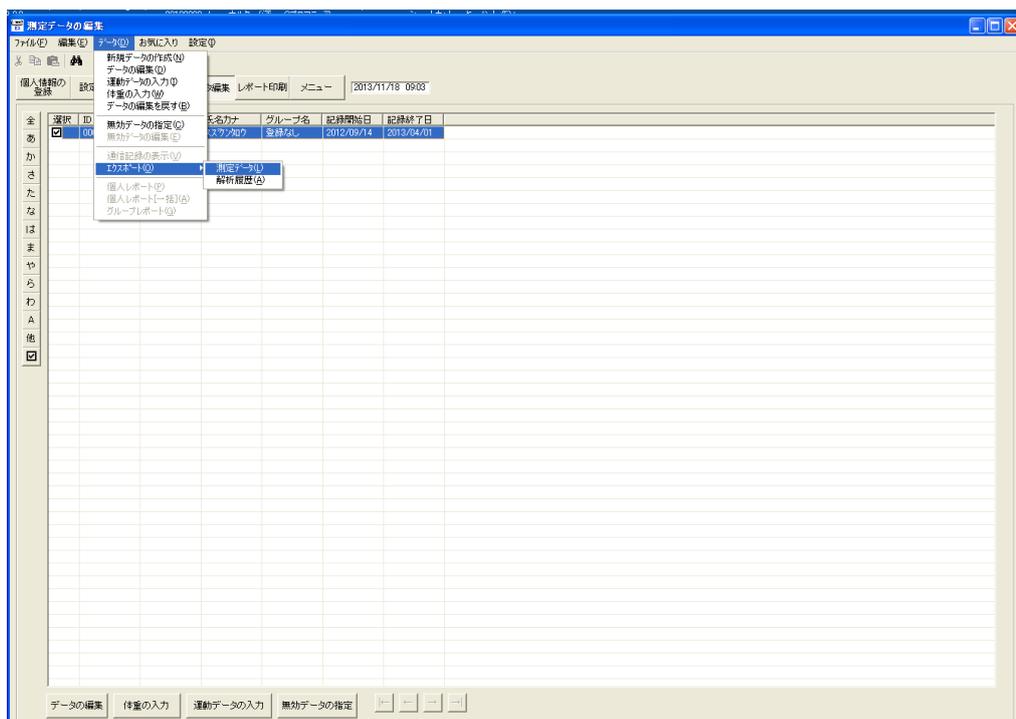

D) データの出力

取出したい日付の期間を設定して、「出力」ボタンをクリックしてください。

※通常は「ライフコーダ EX 形式での保存」が選択されます。

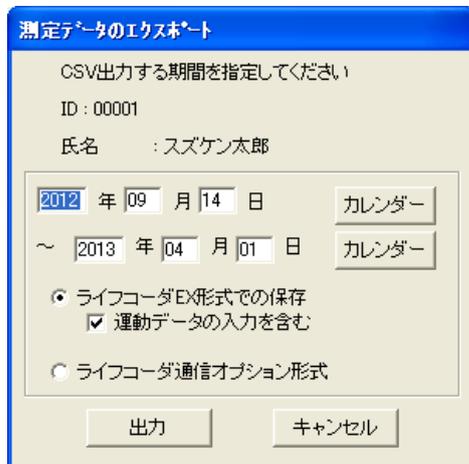

ファイル保存のダイアログが表示されますので、ライフコーダデータのファイル名と保存場所を指定してください。

デフォルトでは、マイドキュメントの下に保存されます。