

ライフライザー05 コーチのバージョンアップのお願い

平素より弊社の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

「行動変容支援ソフトウェア ライフライザー05 コーチ」（以下、ライフライザー05 コーチ）の Ver.2.04 以前のものをご使用の場合、以下の条件において距離欄に測定数値が表示されないという不具合が発生します。ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

- ・ 不具合内容

ライフコーダ GS4 秒版をライフコーダ 4 秒版通信ソフトにて通信して作成されるライフライザー05 コーチフォーマット形式の CSV ファイルを、ライフライザー05 コーチにインポートした場合に、レポートの距離欄に測定数値が表示されない不具合が発生します。

(詳細は次ページの図1をご参照ください。)

ライフライザー05 コーチ Ver.2.04 以前のものをご利用の方は、最新版のライフライザー05 コーチへのバージョンアップを実施していただきますようお願いいたします。

最新のバージョンアップ版は、次のウェブサイトよりダウンロードできます。


ウェブサイト：<http://www.suzuken.co.jp/product/healthcare/support.html>

○バージョンアップ時の注意事項

- (1) バージョンアップをおこなう前には、測定データが保存されているデータベースのバックアップを必ず実施してください。バックアップについてはライフライザー05 コーチ操作マニュアルにある「バックアップ」の項をご参照ください。
- (2) 現在インストールされているライフライザー05 コーチのバージョンをご確認ください。既にインストールされているバージョンが同じ場合、アンインストールが実行される場合があります。アンインストールが実行されるとデータベースを含む全てのファイルが削除されます。インストールされているライフライザー05 コーチのバージョンは、ライフライザー05 コーチの起動時に表示される画面（図2参照）で確認できますので、インストールされているバージョンをご確認の上、インストールされているバージョンがバージョンアップ版のバージョンよりも古い場合にのみ、バージョンアップを実施していただけますようお願いいたします。

図1 歩行距離の数値情報の一例

(a) サマリーレポート

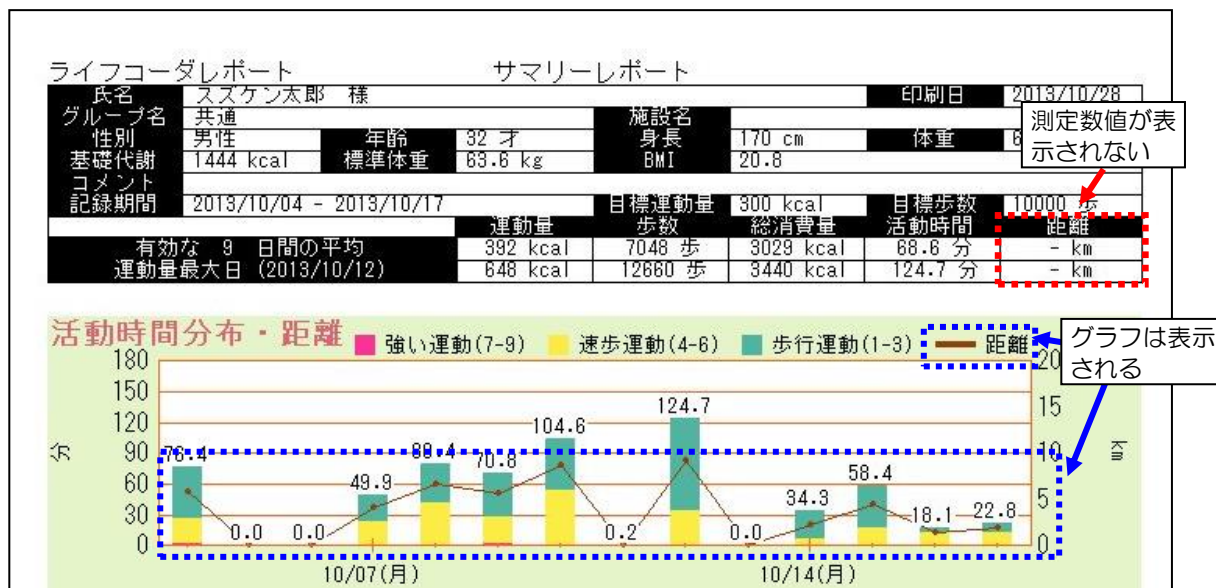

(b) 日内変動グラフ

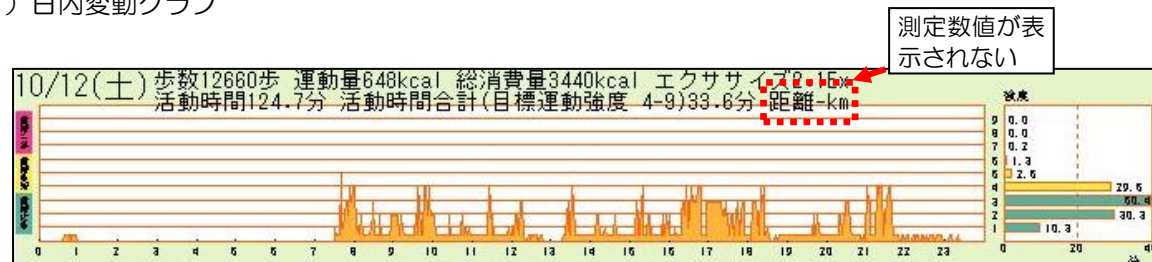


図2 ライフライザー05 コーチ起動時に表示される画面

