

ライフコーダ 4 秒版通信ソフトをダウンロードされたお得意さまへのお願い

平素より弊社の製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度ダウンロード頂いたライフコーダ 4 秒版通信ソフト Ver.2.10 以降（以下：本製品）をインストールされた PC で、「ライフライザー05 コーチ（Ver.2.02～2.12）」または「ライフライザー05 パーソナル（Ver.1.01～1.06）」をご利用いただいている場合、お手数をおかけいたしますが、これらのソフトのバージョンアップも併せてお願いいたします。

1. バージョンアップお願いの理由

「旧バージョンのソフト※1」を、64bit OS 搭載 PC の一部機種にインストールした際に、ライフコーダと通信ができないという不具合が発生いたしました。

※1 旧バージョンのソフト

- ・ライフライザー05 コーチ Ver.2.02～2.12
- ・ライフライザー05 パーソナル Ver.1.01～1.06
- ・ライフコーダ 4 秒版通信ソフト Ver.2.02 以前

不具合の原因がドライバソフトであったため、本製品よりドライバソフトを変更いたしました。

「旧バージョンのソフトに搭載されているドライバソフト」と「本製品に搭載されているドライバソフト」とには互換性が無いため、「旧バージョンのソフト」がインストールされた PC に本製品をインストールした場合、「旧バージョンのソフト」ではライフコーダと通信できなくなります。（本製品とライフコーダとの通信は問題なく行えます。）

このため、「ライフライザー05 コーチ」と「ライフライザー05 パーソナル」のバージョンアップをお願いいたします。

2. バージョンアップ手順

(1) 現在ご利用いただいている「ライフライザー05 コーチ」または「ライフライザー05 パーソナル」のバージョンを確認してください（図1、図2）。

(2) 以下のウェブサイトでダウンロード可能なバージョンアップ版のバージョン※2 と(1)で確認したバージョンとを比較し、バージョンアップ版が新しい場合にのみ、ダウンロードしインストールをおこなってください。

ウェブサイト：<http://www.suzuken.co.jp/product/healthcare/support.html>


※2 2015 年 2 月現在の最新バージョン

- ・ライフライザー05 コーチ Ver.2.20
- ・ライフライザー05 パーソナル Ver.1.10

図1 ライフライザー05 コーチ起動時画面



図2 ライフライザー05 パーソナル起動時画面

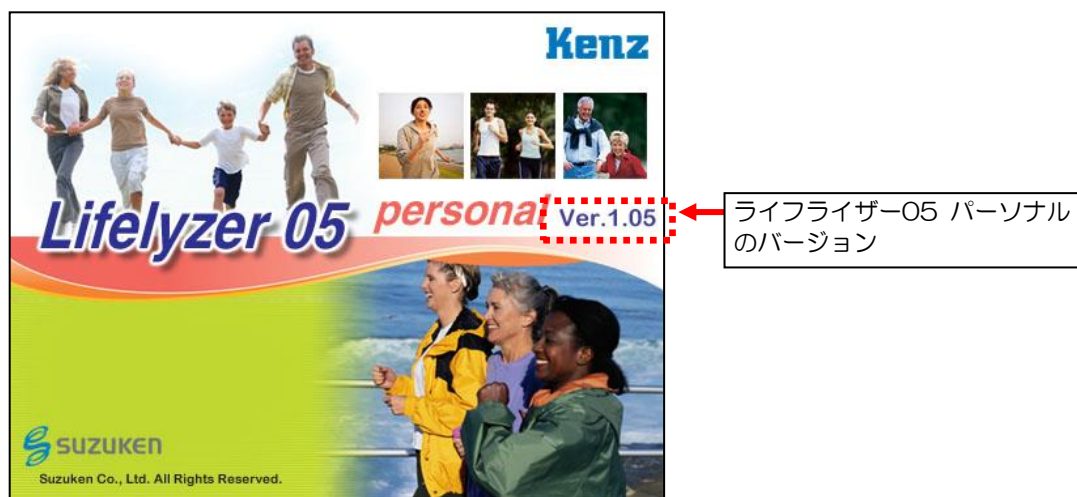

注意

(1)で確認したバージョンとダウンロードしたバージョンが同じ場合、インストール時にアンインストールが実行される場合があります。

アンインストールが実行されると CSV ファイル以外のデータベースを含む全てのファイルが削除されます。

「ライフライザー05 コーチ」および「ライフライザー05 パーソナル」のバージョンアップをおこなう前には、データベースのバックアップを必ず実施してください。

バックアップ方法については、各操作マニュアルの該当項目をご確認ください。

○該当項目

- ・ライフライザー05 コーチ

バックアップ

- ・ライフライザー05 パーソナル

データベースのバックアップ作成、バックアップしたデータベースの復元