

## 新しいパソコンへのデータベース移行手順

今までのパソコンでご利用いただいているライフライザー05 パーソナルのデータを新しいパソコンでもご利用いただく場合、データの移行作業が必要となります。新しいパソコンにライフライザー05 パーソナルをインストールされましたら、下記の手順に従ってデータベースの移行を実施してください。

### (1) 今までご使用のパソコンからデータベースのバックアップ

ライフライザー05 パーソナルをインストールしたフォルダ内に、データベースファイルである「PAAS.mdb」※ファイルとそのバックアップファイルである「PAAS.mdb.bak」※ファイルの 2 つがあります。USB メモリ等にコピーしてください。

ライフライザー05 パーソナルのインストール先がデフォルトの場合は、「PAAS.mdb」及び「PAAS.mdb.bak」は以下のフォルダに保存されています。

「C:¥suzuken¥Lifelyzer05¥personal¥data¥mdb」

※OS の設定によっては、「PAAS.mdb」及び「PAAS.mdb.bak」は、それぞれ「PAAS」、「PAAS.mdb」と表示される場合があります。

### (2) 新たにインストールしたパソコンへ、 バックアップしたデータベースの移行

**注意:**

データベースの移行前に、新しいパソコンでライフコーダとの通信は行わないでください。移行した際に、ライフライザー05 パーソナルに保存されているデータは削除され、バックアップしたデータベースの内容に置き換わります。

新しいパソコンにライフライザー05 パーソナルのインストールを行った後、バックアップを行ったデータベースファイル「PAAS.mdb」をライフライザー05 パーソナルの再インストール先にある「PAAS.mdb」ファイルに上書きを行ってください。

ライフライザー05 パーソナルのインストール先がデフォルトの場合は、「PAAS.mdb」は以下のフォルダに保存されています。

「C:¥suzuken¥Lifelyzer05¥personal¥data¥mdb」