

ライフライザー05 パーソナルのご使用にあたって

1. 操作マニュアルについて

在庫の出荷状況により、製品に付属の操作マニュアルが最新のソフトウェアを反映していない場合がございます。

下記 URL 先の弊社サポートページから最新のソフトウェア、取扱説明書、活用資料等をダウンロードできますので、お手数をおかけしますが、ご確認をお願いいたします。

URL : <http://www.suzuken.co.jp/product/healthcare/support.html>

2. バージョンアップ時の注意事項

- (1) バージョンアップをおこなう前には、測定データが保存されているデータベースのバックアップを必ず実施してください。バックアップについてはライフライザー05 パーソナル操作マニュアルにある「データベースのバックアップ作成」の項をご参照ください。
- (2) 現在インストールされているライフライザー05 パーソナルのバージョンを確認してください。同じバージョンにインストール作業をおこなうと、**アンインストール**が実行される場合があります。アンインストールが実行されるとデータベースを含む全てのファイルが削除されます。インストールされているライフライザー05 パーソナルのバージョンは、ライフライザー05 パーソナルの起動時に表示される画面の上部メニュー「ヘルプ」をクリックすることで表示される「バージョン」を選択すれば確認できますので、インストールされているバージョンをご確認の上、インストールされているバージョンがバージョンアップ版のバージョンよりも古い場合にのみ、インストール作業（バージョンアップ）を実施してください。

